



Laver

à l'eau tiède à l'aide
d'un chiffon humide



Eviter

l'exposition à une
source de chaleur



Retirer

les supports le soir
pour les assécher

Nous vous conseillons de changer la
couverture des supports **au minimum 1 fois
par année (hygiène).**

Conseils d'entretien pour supports

**Une question?
Contactez-nous:**



Rieder Orthopédie SA
Av. de Louis Ruchonnet 6
1003 Lausanne
021 351 65 55

E-mail : lausanne@rieder-ortho.ch
www.rieder-ortho.ch

Informations

Aujourd'hui, vous portez pour la première fois vos supports plantaires. Ceux-ci sont produits dans nos ateliers et adaptés à vos pieds. Il se peut que lors de l'essayage, vous ayez une sensation désagréable. Dans ce cas, nous vous conseillons un port progressif de vos supports en augmentant chaque jour la durée. Après 2 semaines, vous devriez pouvoir les porter avec un minimum de contraintes durant toute une journée. Si toutefois un problème devait persister, n'hésitez pas à nous contacter pour un contrôle.

Si vous utilisez une crème pour les pieds, habituez-vous à l'appliquer le soir. La surface de vos supports pourrait se décoller et se dégrader au contact de la peau trop grasse.

En suivant les conseils indiqués au verso, les supports plantaires ont une durée de vie de **2 à 3 ans**. Cependant la physiologie du pied peu changer. Prenez rendez-vous **chaque année** pour un contrôle.

Rieder Orthopédie SA
le pied c'est nous !



Rieder Orthopédie SA
Av. de Louis Ruchonnet 6
1003 Lausanne
021 351 65 55

E-mail : lausanne@rieder-ortho.ch
www.rieder-ortho.ch